

TECHNICAL DOCUMENT RESERVED FOR PROFESSIONAL USE BY SOTHYS BEAUTY THERAPISTS



SOTHYS

PARIS

INOVÁCIA

MICRO DERMOBOOSTER™

Sothys expertíza v kombinácii
s technickým prevedením.

THE SOTHYS
DIFFERENCE

HĽAVNÁ VÝHODA

VYTVORENIE NOVÉHO PROTOKOLU

Oveľa viac ako iba prístroj,
je to jedinečný Sothys protokol
vylepšený kozmetickým prístrojom.

MICRO DERMOBOOSTER™
PRÍSTROJ JE TRENDOVÝ, ALE
ZÁROVEŇ ODLIŠNÝ OD INÝCH
DOSTUPNÝCH PRÍSTROJOV NA TRHU.

KOMBINUJE 3 FUNKCIE S POUŽITÍM INDIVIDUÁLNYCH STERILNÝCH APLIKÁTOROV*:

- Estetickú mikrodermabráziu
- Kontrolované kozmetické mikroihičkovanie
- Masáž

* S výnimkou masážneho aplikátora, ktorý musí byť po každom použití dezinfikovaný



MICRO DERMOBOOSTER™ PRÍSTROJOVÝ PROTOKOL GARANTUJE:

- Vyzerateľ viditeľne **mladšie bez**
chirurgických zákrokov
- Kozmetická **efektivita**
- Kontrolovaná **bezpečnosť**



PRE KOHO JE MICRO DERMOBOOSTER™ VHODNÝ:

- Pre **MILLENNIÁLOV**,
ktorí sú široko vystavení sociálnym
médiám a túžia po bezchybnej pleti.
- Ženy a muži **NAD 40** rokov,
ktorí chcú mať pod kontrolou svoje
starnutie.



JEDNOTLIVÉ KROKY V OŠETRENÍ

KROK 1

ODSTRÁNENIE MAKE-UPU



ZÁKLADNÉ KROKY, KTORÉ PRIPRAVIA PLEŤ NA OŠETRENIE.

KROK 2

PRÍPRAVA PLETI: ESTETICKÁ MIKRODERMABRÁZIA



NAJVIAC INOVATÍVNA FORMA ESTETICKEJ MIKRODERMABRÁZIE

- Všetky typy pleti
- Všetky ročné obdobia

PÍLING

GLYSALAC PRO PEEL

Chemická exfoliácia s 20 % kyselinou glykolovou + 2 % kyselina salicylová.

HĽBKOVÉ ČISTENIE

DESQUACREM FORTE

Chemická exfoliácia s 2 % kyselinou salicylovou. Mechanický piling so zrnčkami z ryže.

ESTETICKÁ MIKRODERMABRÁZIA

MECHANICKÉ PÍLINGOVANIE S POUŽITÍM PRÍSTROJA

Aplikácia pleťovej vody Purity na úplné vyčistenie.

SOTHYS PRIDANÁ HODNOTA

- Bez odsávania
- Bez hliníkových kryštálov

Týmto krokom sa odstránia odumreté bunky z povrchu kože. Kombinuje dva typy chemickej exfoliácie s použitím produktov s mechanickou exfoliáciou pomocou sterilného nylonového mikroabrazívneho rotačného kotúča.

KROK 3.1

KOMPLETNÝ KOZMETICKÝ MICRONEEDLING



POČET štetín: 20
DLŽKA štetín: 0,35 mm

KOZMETICKÝ MICRONEEDLING S MICRO-L HLAVICOU

1. APLIKÁCIA POUŽÍVAJÚCA „MICRO-L“ HLAVICU NA SUCHUJ PLETI POMALÝMI POHYBMI

APLIKÁCIA ŽIARENIA POMOCOUCO MICRONEEDLING FUNKCIE

2. APLIKÁCIA POUŽÍVAJÚCA „MICRO-L“ HLAVICU S RÝCHLEJŠÍMI POHYBMI

ZÓNA APLIKÁCIE: TVÁR, KRK, DEKOLT

SOTHYS PRIDANÁ HODNOTA PRE KROKY 3.1 A 3.2

- Žiadne ihly, namiesto toho nylonové štetiny, ktoré sú menej agresívne a kontrolovanejšie, bez rizika alergie
- Optimalizovaná dĺžka a tvar štetín

Táto technika spočíva v použití štetín na vytvorenie mikrokanálov. Perforácie vyrobené v epidermálnom tkanive tvoria viac mikrokanálov, ktoré umožňujú aktívnym zložkám starostlivosti o pokožku preniknúť hlbšie. Tiež spôsobuje reakciu, ktorá automaticky aktivuje prirodzené mechanizmy pokožky:

- Aktivácia fibroblastov: tvorba kolagénu a elastínu.
- Biofyzikálna stimulácia kožného tkaniva.

KROK 3.2

CIELENÝ KOZMETICKÝ MICRONEEDLING



POČET štetín: 6
DLŽKA štetín: 0,45 mm

KOZMETICKÝ MICRONEEDLING S «MICRO-S» HLAVICOU

APLIKÁCIA REGENERAČNEJ AMPULKY

- Efektívnejšie a viac komfortné
- Sterilné štetiny na jedno použitie

! STERILNÉ NÁSTAVCE NA JEDNO POUŽITIE ZARUČUJÚ HYGIENU A BEZPEČNOSŤ SPOTREBITEĽA

SOTHYS NOVINKA

MICRO DERMOBOOSTER™ PROTOKOL

1 hod. a 15 min. high-tech
ošetrenie kombinujúce
estetické techniky
a okamžitý, dlhotrvajúci
a viditeľný efekt.



VYROBENÉ V NEMECKU

KROK 4

MASÁŽ

CIEL:

reprodukuje
manuálnu
masáž hnetenia
a rolovania od
terapeutky



SPRAVÍME MASÁŽ MASÁŽNOU HLAVICOU

APLIKUJTE REGENERAČNÚ EMULZIU
AKO MASÁŽNY PRODUKT

Masážna technika pozostáva z mechanickej
masáže použitím oválnej rotačnej hlavice
vyrobenej z jemného silikónu.

NA POVRCHU:

Povrchová masáž tkanív kože.

V HĺBKE:

Vibrácie, ktoré spôsobujú nedobrovoľné svalové
sťahy v podkožných svaloch (kontrakcie ako pri
reflexe).

- Podpora mikrocirkulácie
- Spevnenie pleti
- Boj proti ovísajúcim tkanivám

KROK 5

ZÁVER OŠETRENIA



HYDRATAČNÁ AMPULKA + OCHRANNÝ FLUID NA TVÁR S SPF50

NA DOMA



Po ošetrení sa odporúča
3 dni doma používať
Hydratačné ampulky.

EFEKTIVITA

VÝSLEDKY EFEKTIVITY PODĽA ODBORNÍKOV.

VÝSLEDKY KLINICKÝCH TESTOV*

PO JEDNOM
OŠETRENÍ

PO 3 OŠETRENIACH + 3 DŇOCH
POUŽÍVANIA HYDRATAČNÝCH
AMPULIEK NA DOMA

HUSTOTA
POKOŽKY

+9%

+16%

ZJEDNOTENIE
TÓNU PLETI/
NEDOKONALOSTI

+39%

+58%



PRED



PO



*Testy boli vykonané na 20 ľuďoch.

**Sebahodnotenie výsledkov ošetrovania na 10 stupňovej stupnici vykonané 20 ľuďmi.

POKRAČOVANIE STAROSTLIVOSTI NA DOMA



PO DOBU 3 DNÍ PO OŠETRENÍ

HYDRATAČNÉ AMPULKY

Po ošetrení pokračujeme starostlivosťou o pleť na doma s hydratačnými ampulkami (balenie obsahuje 6 ks ampuliek).

Aplikujte ráno a večer počas 3 dní na zvýšenie efektivity ošetrovania.

REGENERAČNÁ EMULZIA

použitá ako maska alebo sérum

REPARAČNÝ BALZAM

použitý ako krém

OCHRANNÝ FLUID NA TVÁR S SPF50

POKRAČUJTE SÉROM A KRÉMOM PODĽA POTREBY

OMLADZUJÚCE SÉRA A KRÉMY

NUTRITIVE VÝŽIVNÝ KRÉM

INTENZÍVNE HYDRATAČNÉ SÉRUM

HYDRATAČNÝ OMLADZUJÚCI KRÉM

SECRETS DE SOTHYS

- PREMIUM OMLADZUJÚCI TVÁROVÝ KRÉM
- PREMIUM OMLADZUJÚCI KRÉM NA OČI A PERY
- LA CRÉME 128

LÍNIU NA STAROSTLIVOSŤ O OČNÉ OKOLIE

BX NAPĽNAČ VRÁSOK

ZÁKLADNÚ STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ

NEODPORÚČAME POUŽÍVAŤ S TÝMITO PRODUKTAMI

PRODUKTOVÁ LÍNIA NO₂CTUELLE™

PRODUKTOVÁ LÍNIA DETOX ENERGIE™

EFEKTIVITA

VÝSLEDKY EFEKTIVITY PODĽA ODBORNÍKOV.



HYDRA 3HA™ INTENZÍVNE OŠETRENIE

Toto luxusné ošetrovanie bolo špeciálne navrhnuté tak, aby vyhovovalo potrebám hydratácie všetkých typov pleti v kombinácii so špeciálnym protokolom šiestich fáz, exkluzívnej Digi-esthétique® masážnej techniky a najnovšej generácie hydratačných účinných látok.

DETOX ENERGIA™ INTENZÍVNE OŠETRENIE

Ošetrovanie dodá pleti energiu a pomáha jej brániť sa v každej situácii pred škodlivými účinkami environmentálneho stresu, ktorý môže urýchliť jej starnutie.

Toto ošetrovanie je spojené aj s čistením pleti a ako darček dostanete domov 7 ml Energizujúceho séra na predĺženie účinkov ošetrovania.

OMLADZUJÚCE INTENZÍVNE OŠETRENIE

Vysoko sofistikované ošetrovanie, ktoré spĺňa rovnaké princípy ako ostatné intenzívne ošetrovania Sothys, spája ultra-cielené produkty s odbornými aplikačnými metódami. Sothys zaručuje účinnosť tohto profesionálneho ošetrovania na základe piatich kľúčových krokov a viac ako ôsmich špecifických textúr a navyše zažijete skutočný pocit relaxácie pre viditeľne mladšiu pleť.

MICRO DERMBOOSTER™
PRÍSTROJ POSILŇUJE ÚČINOK
NIELEN INTENZÍVNYCH
PROFESIONÁLNYCH OŠETRENÍ
SOTHYS, ALE AJ OSTATNÝCH
PROCEDÚR, KTORÉ
SOTHYS PONÚKA VRÁTANE
ZÁKLADNÝCH OŠETRENÍ,
OKYSLIČUJÚCEJ SEZÓNNEJ
TVÁROVEJ KÚRY ALEBO
DETOXIKAČNÉHO PÁNSKEHO
OŠETRENIA.

ZHRNUTIE

OVEĽA VIAC AKO
IBA PRÍSTROJ, JE TO
JEDINEČNÝ SOTHYS
PROTOKOL VYLEPŠENÝ
KOZMETICKÝM
PRÍSTROJOM.

- ▶ Cielené zameranie
- ▶ Osvedčená účinnosť
- ▶ Kombinované techniky
- ▶ Jedinečné techniky



www.sothys.sk